

Sistema de Gerenciamento Fecal FlexiSeal[®] SIGNALTM FMS

CARACTERÍSTICAS



Flexi-Seal[®] SIGNAL[™] FMS é um sistema fechado, seguro e eficaz para o gerenciamento fecal, promovendo a melhoria na qualidade do atendimento ao paciente.



Bolso de dedo

Projetado para auxiliar na inserção do balão. Ao inserir o dedo na abertura que simula um bolso, é possível guiar o balão até o reto pelo toque.



Balão de retenção de baixa pressão

Moldado em silicone, é macio e flexível para se ajustar à anatomia da ampola retal, proporcionando melhor vedação e diminuindo possíveis vazamentos.



Via de irrigação

Utilizada para promover a irrigação do cateter através da inserção de água, reestabelecendo o fluxo das vezes, e também como via para administração de medicamentos.



Bolsa com filtro de carvão

Transparentes, para monitorar o aspecto e volume das fezes. Com sistema antirrefluxo e tampa de fechamento, evitando contaminação cruzada, possui filtro de carvão para minimizar gases.



Via de inflação com indicação de preenchimento

A câmara oval sinaliza quando o nível de inflação do balão atinge a capacidade anatômica ideal. O balão nunca deverá ser inflado com mais de 45ml.



Tira de fixação

Permite a fixação simples e segura do dispositivo no leito do paciente.

Indicações

Controle da incontinência fecal de pacientes que apresentem fezes líquidas ou semi-líquidas.

PONTOS CHAVE

• Controle da disseminação da infecção nosocomial

Ajuda a prevenir a disseminação de infecções ao derivar e conter efetivamente o conteúdo fecal no sistema. Os resultados *in vitro*¹ revelaram que a infecção por *C. difficile* estava contida de forma eficaz e não estava associada a qualquer contaminação por *C. difficile* do exterior do dispositivo.

• Redução do risco de perda de integridade cutânea

O desvio efetivo e a contenção fecal ajudam a manter o paciente limpo, seco e confortável, ajudando a melhorar o cuidado e o conforto do paciente. Em 92% dos pacientes que usaram o Flexi-Seal[®] FMS, a integridade da pele foi mantida ou melhorada².

• Isolamento da lesão

Projetado para reduzir o risco de lesões de pele devido ao seu efetivo gerenciamento e contenção fecal, além de proteger as feridas, queimaduras e áreas cirúrgicas da umidade fecal produzida pelo contato com fezes.

• Melhoria do conforto e atendimento ao paciente

O desvio efetivo e a contenção fecal ajudam a melhorar o cuidado e o conforto, mantendo o paciente limpo, seco e confortável.

1-Use of filtered faecal collection bags to contain Clostridium Difficile: an in vitro study, WHRI 3274 MA138. September 25, 2009. 2- Padmanabhan A, Mark Stern, Jeffrey Williams, Mary Mangino. Managing diarrhea and fecal incontinence: results of a prospective clinical study in the ICU. Annual Symposium on Advanced Wound Care & Medical Research Forum. 2006.

GUIA DE USO

1 Inserção do balão: Insira um dedo com luva lubrificada dentro do bolso azul do balão de retenção e percorra o caminho até o reto.

2 Inflação do balão: O balão pode ser insuflado com água ou soro fisiológico, seguindo os passos abaixo:



1) Conecte a seringa fornecida na via de inflação e puxe o êmbolo para remover qualquer ar que tenha no balão.



2) Preencha a mesma seringa com 45 ml de líquido, conecte novamente à via branca e pressione lentamente o êmbolo da seringa.



3) A câmara oval, ao se expandir, sinaliza quando o nível de inflação do balão atinge a capacidade anatômica ideal, nunca ultrapassando 45 ml.

3 Troca da bolsa: Graduada em 1 litro, a bolsa é facilmente trocada e encaixa-se perfeitamente na flange através de uma pequena pressão.

4 Remoção do dispositivo: O balão de retenção deve ser esvaziado encaixando a seringa na via branca de inflação, e puxando lentamente o êmbolo para retirada total do líquido.

Para mais detalhes, recomendamos a leitura da instrução de uso que acompanha o produto.

REFERÊNCIAS

ICC	Cód.	Cód. Int.	Descrição do Produto	Quantidade
418000	1710423	1710423	Sistema de Controle Fecal Flexi-Seal® SIGNAL™ FMS KIT*	1 KIT
411108	1704336	1704336	Bolsa Coletora Flexi-Seal Fms Privacy	10 unidades

*Cada Kit Contém 3 bolsas coletoras

Dispositivo Flexi-Seal Signal - ANVISA nº 80523020054

Bolsa Coletora - ANVISA nº 80523029013

