



AvelleTM

Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

GUIA DE CUIDADOS



ConvaTec 

A Diferença da Tecnologia Hydrofiber®

A Tecnologia Hydrofiber® que você
confia, combinada com o poder
de cicatrização da Terapia por
Pressão Negativa (TPN) por até 30 dias.



Neste guia você encontrará informações importantes para garantir um bom funcionamento do seu curativo e como resultado acelerar a cicatrização da sua ferida.

Avelle™

Sistema de Tompação Passiva Negativa para Feridas



Serviço de Atendimento ao Cliente

0800-7276-115

sac.brasil@convatec.com

www.convatec.com.br

[f/convatecbrasil](https://www.facebook.com/convatecbrasil) [@convatecbrasil](https://www.instagram.com/convatecbrasil)

®/™ Avelle, Hydrofiber and AQUACEL are trademarks of ConvaTec Inc.

CUIDADOS

Banho

Avelle™
Ortodoxo de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

1 - Antes do banho, desligue o equipamento pressionando o botão azul durante 3 segundos;



2 - Desconecte o equipamento e a extensão do curativo - coloque em local seguro e seco.



3 - Não molhe nem submerja o curativo;



CUIDADOS

Banho

Avelle™
Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

4 - Proteja o curativo com 'saco' plástico;



5 - Feche a borda com fita adesiva para impedir que entre água (ex. fita microporosa ou fita crepe);



6 - Após o banho reconecte o curativo ao equipamento e pressione o botão azul por 3 segundos para ligar a máquina.



**Evite banhos muito longos e quentes –
pois o filme pode descolar.**

CUIDADOS

Manutenção do curativo

Avelle™
Ortodoxo em Terapia por Pressão Negativa para Feridas



1 - Recorte a área do filme que está descolado/ enrolado. *Não recorte a borda de silicone



2 - Se a pele estiver úmida, secar antes de aplicar o novo filme



3 - Recorte um pedaço de filme, para cobrir a área sem o filme e sobrepor 1cm da borda de silicone e película ao redor (locais identificados pelas setas em amarelo)

3

CUIDADOS

Manutenção do curativo

AvelleTM
Sistema de Tensão por Pressão Negativa para Feridas



4 - Aplique a película cobrindo a área exposta, sobrepondo 1cm da película ao redor



5 - Realize o processo sempre que necessário
*Não sobreponha camadas de filme!

Não sobreponha camadas de filme!

CUIDADOS

Troca do curativo

Avelle™
Orçamos de Sangue por Pressão Negativa para Feridas



Exsudato

Realize a troca do curativo quando:

- O exsudato (secreção) estiver próximo do *soft port* ou;
- De 3 - 4 dias até no máximo em 7 dias

CUIDADOS

Troca do curativo

AvelleTM
Sistema de Troca por Pressão Negativa para Feridas

Caso o exsudato (secreção) chegue ao *soft port*:



- 1 - Desligue o equipamento
- 2 - Entre em contato com o profissional de saúde responsável
- 3 - Realize a troca do curativo

ATENÇÃO

Mantenha o equipamento **DESLIGADO** até a troca do curativo para evitar danos ao equipamento.

CUIDADOS

Alertas e erros

Avelle™
Grupos de Trabalho por Processos Negativos para Pacientes



Luz **VERDE** piscando
O equipamento está funcionando corretamente.



Luz **AMARELA** piscando
Vazamento - Verifique:
1 - Conexão entre máquina, extensão e curativo está bem feita;

2 - Se o curativo está bem fixado - VER manutenção do curativo;

3 - Se o curativo esta íntegro – sem nenhum furo/ rasgo sobre a almofada branca.

CUIDADOS

Alertas e erros

AvelleTM
Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas



Luzes **VERDE** e **AMARELA** piscando - equipamento funcionando corretamente, mas a pilha está acabando.

AÇÃO: Trocar as pilhas em 24 horas.



Luzes apagadas - O equipamento **não** está funcionando.

AÇÃO: Pressionar o botão durante 3 segundos para ligar. Se não funcionar trocar as pilhas.



Luzes **AMARELAS** piscando - Detectado fuga e a pilha está acabando.

AÇÃO 1: Revisar o sistema, o selamento do curativo.

AÇÃO 2: Trocar as pilhas.

CUIDADOS

Máquina/ Equipamento

Avelle™
Gratuito de Serviço por Falhas Negativas para Pacientes



Não entrar com a máquina em:

- Equipamentos de Tomografia computadorizada e/ou Ressonância magnética
- Câmara hiperbárica
- Não passar por detectores de metal – pilhas de lítio

CUIDADOS

Vídeos

AvelleTM
Tratamento de Terapia com Prescrição Regulada para Fome

Assista aqui!



Anotações

CONTATO



Avelle™

Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas



ConvaTec

